


LAMAGNETO PRO

LaMagneto Pro ist das ideale Magnetfeldtherapiegerät für Familienmitglieder, denen die Verwendung von elektromedizinischen Geräten schwerfällt, da die Therapien voreingestellt sind und mit nur einem Klick gestartet werden können.

MERKMALE

- ✓ Zwei unabhängige Kanäle
- ✓ Farbdisplay
- ✓ Intensität des Magnetfelds bis zu 200 Gauss pro Kanal
- ✓ Frequenz 1 bis 120 Hz
- ✓ 63 Programme
- ✓ Doppelter Benutzer
- ✓ Liste „Letzte 10“ verwendete Programme
- ✓ Modus Programm „sperren“
- ✓ Zähler für durchgeführte Therapien und Gesamtstunden der Nutzung

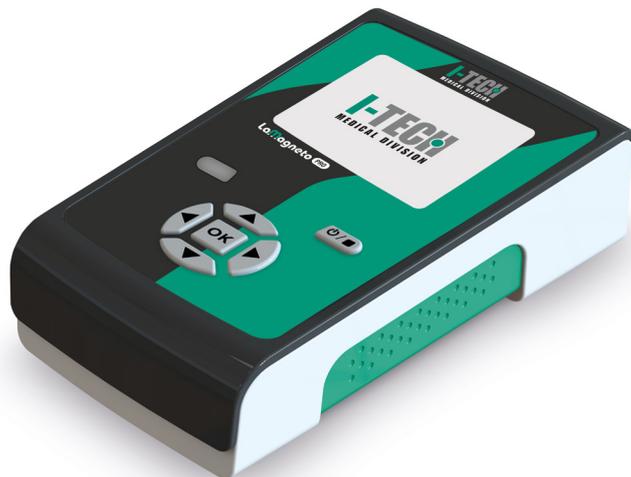

MEDIZINPRODUKT DER KLASSE IIa.

LaMagneto Pro ist ein CE1936-zertifiziertes Medizinprodukt

PROGRAMME

01 Osteoporose	22 Knorpelverletzung	43 Nachtprogramm 15 Hz
02 Arthrose	23 Verletzung der Ligatur	44 Nachtprogramm 50 Hz
03 Arthritis	24 Knochenödem	45 Nachtprogramm 75 Hz
04 Zervikalarthrose	25 Sehnenentzündung	46 Automatisches Scannen (Autoscan)
05 Gelenkschmerzen	26 Kondropatie	47 Beh. 1Hz.
06 Nackenschmerzen	27 Entzündungshemmend	48 Beh. 3Hz.
07 Chronische Schmerzen	28 Schleudertrauma	49 Beh. 5Hz.
08 Frakturen	29 Narbenbildung	40 Beh. 8Hz.
09 Epicondylitis	30 Hautgeschwüre	51 Beh. 10Hz.
10 Epitrochleitis	31 Diskopathie	52 Beh. 15Hz.
11 Pseudarthrose	32 Myalgie	53 Beh. 16Hz.
12 Lumbalgie	33 Neuropathie	54 Beh. 20Hz.
13 Schmerzen im Lumbosakralbereich	34 Muskelzerrung	55 Beh. 30Hz.
14 Schulterarthrose	35 Muskelkrampf	56 Beh. 50Hz.
15 Kniearthrose	36 Rhizarthrose	57 Beh. 50Hz.
16 Periarthritis Schultergelenk	37 Impingement-Syndrom	58 Beh. 60Hz.
17 Koxarthrose	38 Karpaltunnelsyndrom	59 Beh. 70Hz.
18 Muskelatrophien	39 Titan-Prothese	60 Beh. 75Hz.
19 Muskelbehandlung	40 Rotatorenmanschette	61 Beh. 80Hz.
20 Knochennekrose	41 Tarsaltunnel	62 Beh. 90Hz.
21 Algodystrophie	42 Nachtprogramm 1 Hz	63 Beh. 100Hz.

LAMAGNETO PRO

LIEFERUMFANG

- ✓ LaMagneto Pro
- ✓ Ein Bandapplikator mit 3 Magneten
- ✓ Ein professioneller Applikator mit einem Paar Magnetventilen
- ✓ Medizinisches Netzteil
- ✓ Benutzerhandbuch
- ✓ Magnet zur Kontrolle der Therapieausführung
- ✓ Tragetasche
- ✓ Drei Vliesstoffstreifen (TNT) 15x150 cm

ABMESSUNGEN DES GERÄTS 180 x 110 x 50 mm



FAQ

WIE WIRKT DIE MAGNETTHERAPIE?

Die Wirksamkeit der Magnettherapie beruht insbesondere auf der Pulsation des elektromagnetischen Feldes, das in schneller Folge abwechselnd ein- und ausgeschaltet wird. Dieser Mechanismus konditioniert die Zelle, die durch die Abfolge der elektromagnetischen Felder stimuliert wird. Diese wiederum geben Energie an die Zelle ab und stellen das elektrische Gleichgewicht wieder her.

Die biologischen Veränderungen, die durch Magnetfelder an biologischen Membranen, Zellen und Gefäßen hervorgerufen werden, führen zu therapeutischen Wirkungen wie Entzündungshemmung, Ödembekämpfung und Anregung der Gewebereparatur. Die durch die Magnettherapie erzielte Muskelentspannung trägt zur Verbesserung der Mikrozirkulation bei. Die glatten Fasern entspannen sich und es entsteht ein gefäßerweiternder Effekt. Die Freisetzung von Endorphinen trägt dazu bei, die Schmerzschwelle zu erhöhen, und eine leichte Hyperämie hat eine entzündungshemmende Wirkung.

IST DIE MAGNETTHERAPIE TATSÄCHLICH WIRKSAM?

Die Magnettherapie ist seit Jahrzehnten eine etablierte Therapie mit allgemein anerkannter Wirksamkeit. In der Literatur finden sich zahllose klinischen Studien, die die Wirksamkeit der Magnettherapie bei der Behandlung von Muskel-Skelett-Erkrankungen belegen.

GIBT ES KONTRAINDIKATIONEN FÜR DIE MAGNETTHERAPIE?

Die Magnettherapie ist eine der physikalischen Therapien mit den wenigsten Kontraindikationen, wie die zahlreichen klinischen Studien über gepulste elektromagnetische Felder zeigen. Eine Reihe von grundlegenden Warnhinweisen in den Gebrauchsanweisungen sollte beachtet werden, u. a.: Schwangerschaft, Tuberkulose, juvenile Diabetes, akute Viruserkrankungen, Mykosen, Herzerkrankungen, Tumore, schwere Herzrhythmusstörungen, Träger von Herzschrittmachern, Kleinkinder, Träger von magnetisierbaren Implantaten, akute Infektionen und Epileptiker. (Sofern vom Arzt nicht anders verordnet).

WIE LANGE MUSS DIE THERAPIE DURCHFÜHRT WERDEN?

Für eine gute Magnettherapie-Behandlung ist es unabdingbar, zunächst Ihren Arzt zu konsultieren, um die Pathologie, an der Sie leiden, zu identifizieren. Im Allgemeinen erfordert die Magnettherapie mittlere bis lange Behandlungszeiten. Empfohlen werden Zyklen von 45-90 Tagen (oder länger) mit einer Dauer von mindestens 2-4 Stunden täglich, sofern vom Arzt nicht anders festgelegt. Falls erforderlich, kann die Behandlung mehrmals im Jahr wiederholt werden. Zum Beispiel bei Arthrose, Arthritis, Osteoporose und Gelenkschmerzen.

Es besteht kein Risiko einer Überdosierung. Wie bei der Behandlung von Osteoporose ist es sogar möglich, eine nächtliche Therapie von 8 aufeinanderfolgenden Stunden durchzuführen.